



Scheda Tecnica SOLEMARE

Mod.03/ST
SOLEMARE
Pag. N° 1
di Pag. N° 3
Rev. N° 5

MODELLO: SOLEMARE	
Descrizione:	Carrozzina pieghevole ad autospinta manuale sulle ruote posteriori. Leggera con telaio in alluminio.
Destinazione d'uso	Dispositivo medico non invasivo progettato e realizzato per compensare o attenuare un handicap motorio a medio e lungo termine. Il dispositivo è disegnato per l'utilizzatore che lo spinge in autonomia sui corrimano delle ruote posteriori o per un accompagnatore che lo spinge utilizzando le appropriate maniglie di spinta poste sullo schienale. E' utilizzato da pazienti adulti.
Ambiente d'uso	La carrozzina è adatta per l'utilizzo in ambienti esterni con le limitazioni date dagli spazi agibili compatibili con le dimensioni della carrozzina stessa.
Nr. Repertorio DM: 2351572	
Data revisione: 31/01/2025	

Specifiche:

Telaio:	-	pieghevole, in alluminio.
Dimensione ruote posteriori.....	-	24"
Modello ruote posteriori.....	-	Mountainbike appaiate
	-	Sand&Street
Maniglie per accompagnatore.....	-	fisse, montate sul telaio
Pedalino di sbilanciamento.....	-	montato a destra
Tessuto:	-	nylon
Versioni disponibili.....	-	2 ruote posteriori, pedana in tessuto, 2 piedini in alluminio anteriori fissi(SOLEMARE)
	-	2 ruote posteriori, pedana in tessuto, 2 piedini in alluminio anteriori regolabili, 1 forcellone completo di ruotina anteriore centrale non piroettante (SOLEMARE 3)
	-	2 ruote posteriori, pedana in tessuto, due ruotine anteriori non piroettanti (SOLEMARE 4)
Larghezza:.....	-	46 cm
Profondità:.....	-	42 cm
Altezza schienale:.....	-	40 cm
Peso:.....	-	13.5 kg circa (Solemare con ruote Mountainbike appaiate)
	-	17 kg circa (Solemare 3/4 con ruote Mountainbike appaiate)



Scheda Tecnica SOLEMARE

Mod.03/ST
SOLEMARE
Pag. N° 2
di Pag. N° 3
Rev. N° 5

Solemare è una carrozzina da spiaggia multifunzionale con due ruote posteriori da 24".

Solemare 3 è una carrozzina da spiaggia multifunzionale con due ruote posteriori da 24" e una anteriore smontabile.

Solemare 4 è una carrozzina da spiaggia multifunzionale con due ruote posteriori da 24" e due anteriori non piroettanti da 12".

Il telaio è in alluminio, alcuni particolari sono in materiale composito ed il rivestimento è in PE.

Può essere fornita di due modelli di ruote posteriori estraibili (da scegliere al momento dell'ordine):

- Sand & Street, in alluminio e gomma piena da 24" che permettono spostamenti relativamente agili sia sulla sabbia che in mare.
- Mountain-bike appaiate, con cerchio e corrimano in alluminio, gomma pneumatica da 24" che permettono una maggiore facilità di spostamento sulla sabbia.

La carrozzina viene fornita con le ruote posteriori a parte per rendere più agevole il trasporto dell'ausilio.

Nel caso del mod. Solemare 3 viene imballato a parte anche il ruotino anteriore.








Nel caso del mod. Solemare 4 vengono staccate anche le ruote anteriori e la pedana anteriore.

Consultare la scheda d'ordine aggiornata per le varianti ed accessori disponibili.

Gli accessori e le scelte di configurazione hanno diretta influenza sul peso finale dell'ausilio.

Qualsiasi configurazione o riconfigurazione deve soddisfare alcuni limiti in obbligo o esclusione imposti da eventuali esigenze tecniche.

INFO SOLEMARE 2

						
46 cm	42 cm	40 cm	13,5 kg.	H = 93 cm L = 88 cm	82 cm	23 cm 41 cm

Manutenzione: Si raccomanda di:

- Effettuare un accurato controllo della carrozzina almeno ogni tre mesi.
- Dopo il bagno con la carrozzina, si consiglia di lavare le ruote con acqua dolce.
- Se la carrozzina non verrà utilizzata per un lungo periodo, per esempio finita la stagione estiva, lavare le ruote con acqua dolce ed ingrassare bene i perni e le bussole sia sui mozzi delle ruote sia sul telaio.
- Controllare almeno settimanalmente la pressione degli pneumatici (se la carrozzina è stata ordinata con ruote Mountain-bike appaiate). Il pneumatico sgonfio pregiudica la scorrevolezza della carrozzina.

Eventuali interventi e manutenzioni devono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato.

Pulizia: la carrozzina non è un dispositivo sterile. Per la pulizia si raccomanda di utilizzare un panno umido, sapone neutro e alcool 70-90%.



Scheda Tecnica SOLEMARE

Mod.03/ST
SOLEMARE
Pag. N° 3
di Pag. N° 3
Rev. N° 5

AVVERTENZE

Trasporto su veicoli: la carrozzina NON è certificata in accordo alla normativa ISO7176-19 per il trasporto in veicoli in movimento.

Se **utilizzato in combinazione con altri dispositivi** non di produzione OFFCARR si raccomanda di contattare OFFCARR per verificare la compatibilità.

Fonti di calore: Tenere la carrozzina lontana da fonti di calore in quanto non tutti i rivestimenti selezionabili nel modulo d'ordine sono ignifughi.

Dopo un'esposizione elevata alla luce del sole la superficie della carrozzina può raggiungere temperature elevate.

Affrontare pendenze sopra i 6° sempre con un accompagnatore. Questo limite è solo indicativo e dipende dalla configurazione ed in particolare dal bilanciamento dell'insieme carrozzina&utilizzatore.

Il dispositivo è equipaggiato di dispositivo di sbilanciamento per accompagnatore.

Imballaggio, trasporto: Fare riferimento alla sezione "Imballaggio, trasporto e consegna" del manuale d'uso per tutte le relative istruzioni.

Garanzia: Fare riferimento ai termini di garanzia riportati nel manuale d'uso.

In caso di deficit visivi si prega di scaricare la scheda tecnica ed il manuale in formato PDF dal sito www.offcarr.com